

Plasmacytos undersöks med Elisa-metoden, som är en effektiv metod. Blodprovstagningen är lätt och snabb, liksom även förvaringen och sändningen av proverna.

Proverna tas med en s.k. provtagningskam. Den har 12 ”piggar” för blodproverna, 1 pigga / mink. (Bild1)

Läs följande anvisningar noggrant, så att provtagningen, sändningen av proverna och provsvaren sker utan bekymmer och på snabbaste sätt.

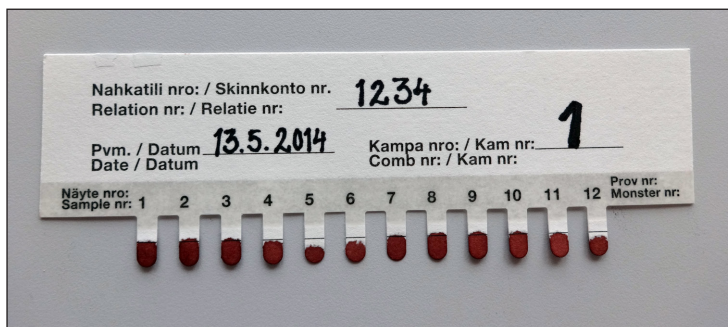


Bild 1

- Beställning av provtagningsmaterialet**  
Provtagningsmaterialet (Bild2) beställs från Fin FurLab i Vasa. Meddela alltid laboratoriet före testningen, när proverna kommer att sändas för undersökning.

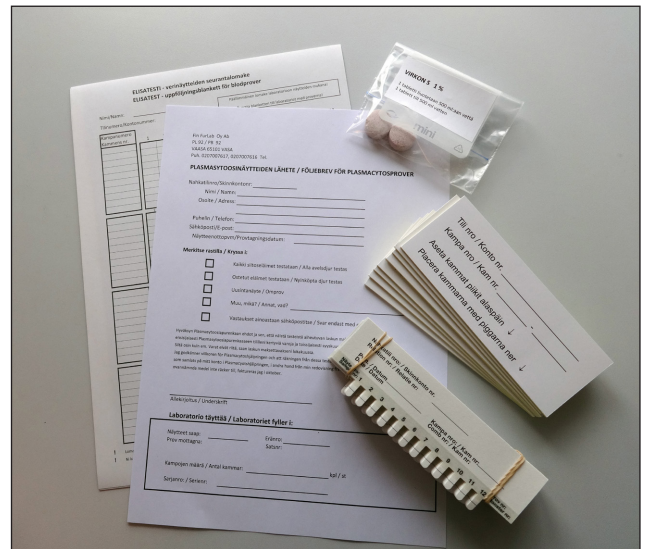


Bild 2

**Beställ provtagningsmaterial från Fin FurLab Oy Ab, tel.0207007617 eller e-post: majvor.eerola@profur.fi**

- Märkning av provtagningskammarna**  
Numrera provtagningskammarna med löpande nummer, för att vi på laboratoriet skall kunna skilja på dem. På varje provtagningskam skall ni fylla i följande uppgifter:

- Farmens skinnkontonummer
- Provtagningsdatum
- Kammens löpande nummer (1,2,3...)

- Förberedande åtgärder på farmen**  
Före ni tar proverna är det bra att göra följande förberedelser:

- Ni kan göra en provtagningsställning (Bild 3) där ni kan ställa både nya kammar och kammar, som redan försetts med blod.
- I skugghuset märker ni noggrant upp nummerordningen på kammarerna och provernas löpande nummer (1-12)

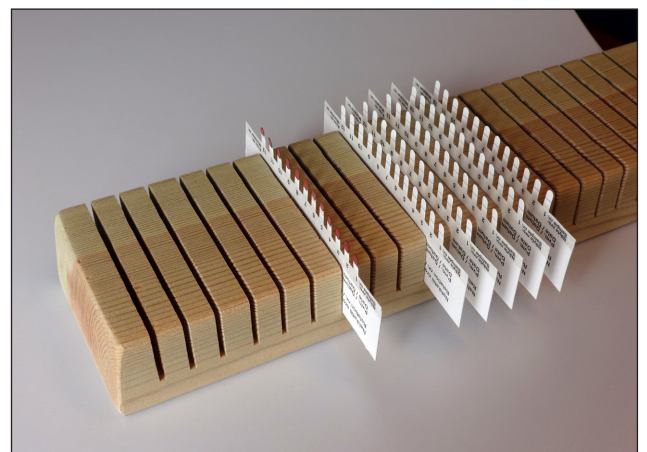


Bild 3

#### 4. Provtagning av djuren

Blodprovstagningen sker på följande vis:

- Klipp minkens klo vid blodlinjen som syns på (Bild 4). Observera att det behövs endast en liten droppe blod på provkammens pigg.
- Kom ihåg att desinficera saxen mellan varje prov med Virkon S
- Vidrör lätt med spetsen av provpiggen vid klon, så att en droppe blod suggs upp. Undvik att drop pa blodet på piggen (då torkar det långsammare och klottar lättare)!
- När provtagningskammen är full, sätter ni den att torka, med piggarna uppåt. På detta sätt försäkrar ni er om att proverna torkar och att de inte blandas ihop.
- Det är mycket viktigt att provtagningskammarna inte rör i varandra, före de säkert har torkat!

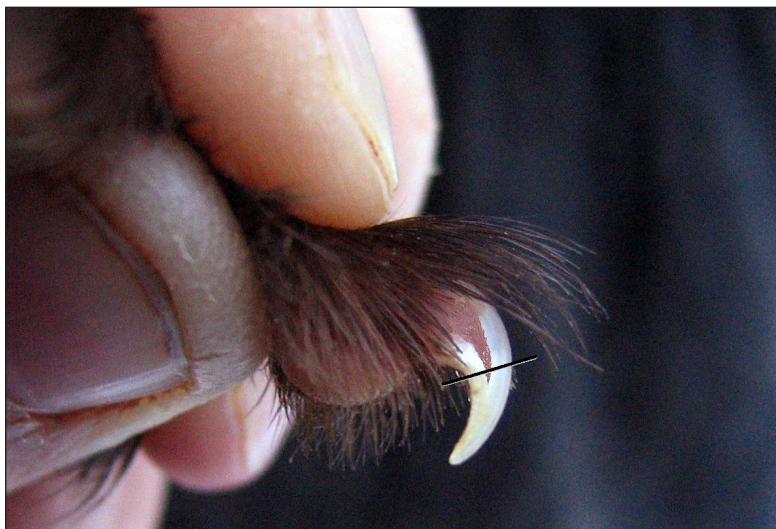


Bild 4

#### 5. Torkning av provtagningskammarna och sändning för analysering

- Provtagningskammarna skall torka omsorgsfullt i rumstemperatur tills blodet säkert har torkat (använd inte blåsare).
- Placera de torra kammarna i kamfodralet och märk det med skinnkontonummer, första och sista kamnumren.
- Kom ihåg att fylla i testningsblanketterna
- Provtagningskammarna och blanketterna skickas i kuvert eller paket till laboratoriet, adressen är:

**Fin FurLab Oy Ab**  
**Plasmacytos**  
**Pb 92**  
**65101 Vasa**

#### 6. Märkning av testresultaten i skugghusen

När testresultaten kommer från laboratoriet skall ni, i skugghusen, märka upp om djuret är friskt eller sjukt.

- Ni tar bort minkar som har påvisats vara positiva i Elisa-testen (smittade djur) så fort som möjligt.
- De smittade djurens burar och lyor skall rengöras och desinficeras, även de närliggande burarna och lyorna.

Fin FurLab Oy Ab