


Plasmasytoosi tutkitaan tehokkaalla Elisa-menetelmällä. Verinäytteenotto on helppo ja nopea, kuten myös näytteiden säilytys ja lähettäminen.

Näytteet otetaan uudenaikaiseen nk. näytekampaan, jossa on 12 "piikkiä" verinäytteitä varten, 1 piikki/minkki (Kuva 1)


Lue seuraavat ohjeet huolellisesti, jotta näytteiden ottaminen, lähettäminen ja tulosten saaminen tapahtuu vaivatta ja mahdollisimman nopeasti.

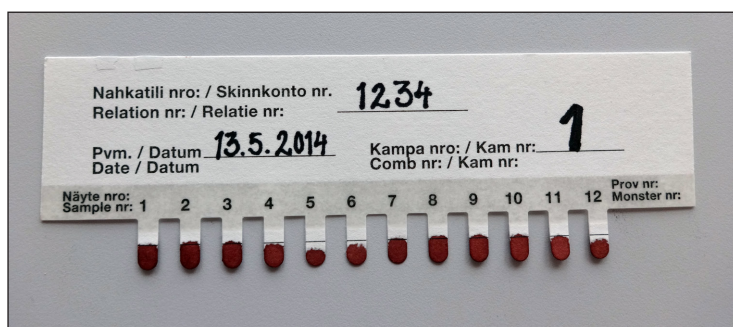

Kuva 1

1. Näyttemateriaalin tilaaminen

Näyttemateriaali (Kuva 2) tilataan Fin FurLabista Vaasasta. Ilmoita aina laboratorioon ennen testausta, milloin näytteet lähetetään tutkittaviksi.

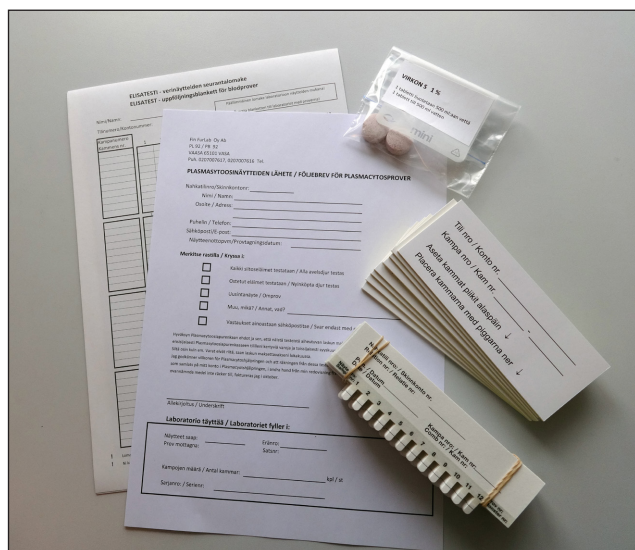

Kuva 2

Tilaa näyttemateriaali Fin FurLabista
puh 0207007 617 tai sähköpostitse: majvor.eerola@profur.fi

2. Näyttemateriaalin vastaanotto, tarkistaminen ja näytekampojen merkitseminen

Numeroi näytekammat, jotta näytteet voidaan yksilöidä laboratoriossa.


Jokaiseen näytekampaan tulee merkitä seuraavat tiedot kammassa erikseen merkittyihin kohtiin:

- tilan nahkatilinumero
- näytteenottopäivämäärä
- näytekamman juokseva numero (1, 2, 3...)

3. Valmistelevat toimenpiteet tilalla

Ennen näytteiden ottamista tulee tehdä seuraavat valmistelevat toimenpiteet:

- Voitte tehdä näytteenottotelineitä, johon voit asettaa sekä uudet kammat että kammat, joihin näytteet on otettu. Teline voi olla puinen lankku johon on sahattu uria pistosahalla. (Kuva 2)
- Merkitse varjotaloissa tarkasti numerojärjestyseen kampojen ja näytteiden juoksevat numerot.

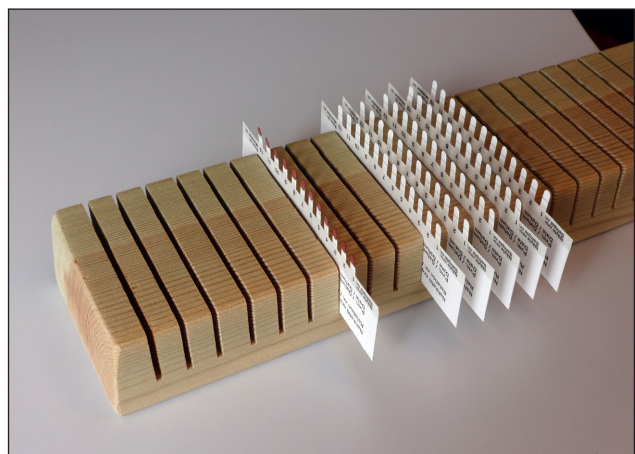

Kuva 3

4. Näytteiden ottaminen minkeistä

Verinäytteiden ottaminen tapahtuu seuraavasti:

- Katkaise minkin kynsi siinä näkyvästä verirajasta (Kuva 4). Huomaa että verta tarvitaan vain pieni pisara piikin kärkeen.
- Muista desinfioida sakset jokaisen testin välissä. Käytä Virkon S.
- Imaise verta kynnen päästä piikin kärkeen (kärki täyteen viivaan asti). Älä kuitenkaan tiputa piikille pisaraa, sillä silloin se kuivuu hitaasti ja saattaa sotkea.
- Kun jokaisessa näytekamman "piikissä" on verinäyte, aseta kampa näytteenottotelineeseen kuivumaan, piikit ylöspäin. Näin eri minkeistä otetut verinäytteet eivät sekoitu keskenään.
- On erittäin tärkeää etteivät näytekammat kosketa toisiinsa, ennen kuin ne ovat varmasti kuivuneet!



Kuva 4

5. Näytekampojen kuivaaminen ja lähettäminen tutkittavaksi

- Kuivatua näytekammat huolellisesti huoneenlämmössä. Älä kuitenkaan käytä puhallinta.
- Kuivatut näytekammat asetellaan kampataskuun ja kampatasku merkitään nahkatilinumeroilla ja kampojen ensimmäisellä ja viimeisellä numerolla.
- Muista täyttää näytemateriaalin mukana tulevat lomakkeet ohjeiden mukaisesti.
- Näytekammat ja täytetyt lomakkeet lähetetään kirjekuoressa tai paketissa laboratorioon, osoitteeseen:

Fin FurLab Oy Ab
Plasmasytoosi
PL 92
65101 VAASA

6. Testitulosten merkitseminen varjotaloissa

Laboratoriosta saadut testitulokset merkitään varjotaloissa kunkin eläimen kohdalle, jotta voidaan erotella terveet ja mahdolliset tartunnan saaneet yksilöt toisistaan.

- Elisa-testissä positiiviseksi todetut (= tartunnan saaneet eläimet) poistetaan tilalta mahdollisimman pian.
- Tartunnan saaneiden eläinten häkit ja pesäkopit samoin kuin viereiset häkit / pesäkopit puhdistetaan ja desinfioidaan huolellisesti!

Fin FurLab Oy Ab